

ОПИСАНИЕ

Пластырь-ингалятор медицинский «Дыши» по ТУ 9393-001-58693373-2014 (далее по тексту – пластырь) представляет собой полоску прямоугольной формы с закругленными углами и без них, из нетканого материала прямоугольной формы с закругленными углами с защитным покрытием. На полоску нанесена клейкая масса с эфирными маслами. Пластырь клеится на одежду.

НАЗНАЧЕНИЕ

Пластырь-ингалятор «Дыши» предназначен для ингаляций, клеящийся на одежду. Эфирные масла, испаряющиеся в процессе применения пластыря, **способствуют профилактике простудных заболеваний, облегчению их симптомов, нормализации дыхания при заложенности носа, облегчают засыпание.**

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Пластырь рекомендуется применять с целью:



уменьшения выраженности симптомов острых респираторных заболеваний (ОРЗ), в т. ч. нормализации дыхания при заложенности носа и облегчения засыпания;



профилактики простудных заболеваний.

СОДЕРЖИТ



масло мятное без ментола
(Oleum menthae)



масло эвкалиптовое
(Oleum Eucalpti)



пихтовое масло
(Oleum Abiesis)



левоментол
(Levomenthol)



лавандовое масло
(Oleum Lavandulae)



терпентиновое масло
(Oleum Terebinthinae)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ


Только для наружного применения.




1 Пластырь вынуть из упаковки.



2 Снять защитное покрытие.

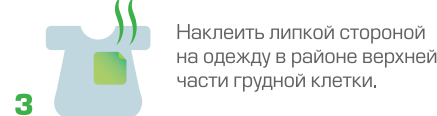

3 Наклеить липкой стороной на одежду в районе верхней части грудной клетки.

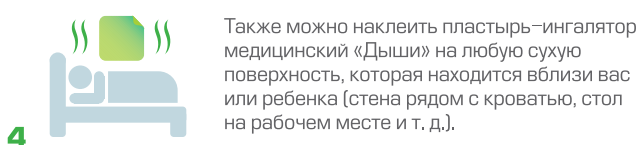

4 Также можно наклеить пластырь-ингалятор медицинский «Дыши» на любую сухую поверхность, которая находится вблизи вас или ребенка (стена рядом с кроватью, стол на рабочем месте и т. д.).



5 С профилактической целью пластырь «Дыши» может применяться в период повышенного риска простудных заболеваний. Для профилактики заражения ОРВИ и другими простудными заболеваниями необходимо наклеить пластырь на верхнюю одежду во время нахождения в общественных местах или транспорте.

Пластырь предназначен для однократного применения.

Один пластырь действует до 8 часов. По истечении 8 часов пластырь следует отклеить. Пластырь предназначен для однократного применения.

Не наклеивайте пластырь на деликатные или белые ткани, ткани с ворсистой поверхностью (бархат, велюр, мех и т.д.), ткани, содержащие в составе более 70 % синтетических материалов, а также на все виды замши, натуральной и искусственной кожи.

Один пластырь действует до 8 часов.

maslo-dishi.ru

ПРИНЦИП РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Пластырь-ингалятор медицинский «Дыши» содержит натуральные эфирные масла, которые:

- обладают противовирусным, антибактериальным, противовоспалительным, болеутоляющим и тонизирующим действием,
- применяются для профилактики простудных заболеваний и в качестве симптоматического средства в составе комплексной терапии ОРВИ.

После удаления защитного покрытия, эфирные масла испаряются с поверхности пластыря.

Эфирные масла уничтожают патологические микроорганизмы, находящиеся в воздухе, за счет чего снижается риск попадания их в организм. Действие пластыря обусловлено действием эфирных масел, входящих в его состав.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ



Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов.



Детский возраст до 2 лет.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Только для наружного применения. Не наклеивать пластырь на кожу.



Избегать контакта пластыря с глазами, со слизистыми оболочками и поврежденными участками кожных покровов.



При возникновении аллергической реакции следует немедленно прекратить использование пластыря и проконсультироваться с врачом.



Перед применением пластыря детьми до 2 лет, беременными или кормящими женщинами необходимо проконсультироваться с врачом.



Не применять лицам с повышенной чувствительностью к компонентам пластыря.



Не использовать пластырь, если нарушена целостность упаковки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Терапия, оториноларингология.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в стационарных и амбулаторных лечебно-профилактических медицинских учреждениях и в домашних условиях.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

При повышенной чувствительности к эфирным маслам, содержащимся в пластыре, возможно развитие аллергических реакций.

ГАРАНТИИ

Изготовитель гарантирует соответствие пластыря требованиям технических условий при соблюдении условий применения, транспортирования и хранения.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В условиях эксплуатации пластырь нетоксичен, не обладает местно-раздражающим и sensibilizing действием, не пирогенен; по токсикологическим показателям отвечает требованиям безопасности, предъявляемым к медицинским изделиям.

Пластырь относится к горючим веществам, не взрывоопасен.

Требуется осторожность при применении пациентами, склонными к аллергическим реакциям на компоненты композиции эфирных масел.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре не выше + 25 °С и относительной влажности 45–80 %. Хранить в недоступном для детей месте.

Пластырь-ингалятор медицинский «Дыши» по ТУ 9393-001-58693373-2014. РУ № РЗН 2014/2246 от 14.08.2019 г.

Размер: 6,0 см x 5,0 см.

Срок годности: 3 года с даты изготовления.

Утилизация: использованный пластырь относится к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.

Место производства: АО «ВЕРОФАРМ», РФ, 394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80.

Производитель и организация, принимающая претензии от потребителя: АО «АКВИОН», РФ, 123112, г. Москва, ул. Пресненская

наб., д. 8, стр. 1, эт. 8, пом. 1Н – комн. 11. Тел./факс: +7 (495) 780-72-34, akvion.ru.

Телефон горячей линии: 8-800-200-86-86 (с 9.00 до 18.00, в будни).

